

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ



ОРТЕЗ НА ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЙ СУСТАВ

FG-100

- СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАЛЬЦЕВ ПОСЛЕ ТРАВМ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- СОЗДАЕТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ НОШЕНИИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ.
СОБЛЮЖДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЙ СУСТАВ
(ПЛАСТИКОВАЯ ШИНА НА ПАЛЕЦ)**

FG-100

WWW.ORLETT.RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фаланги пальцев кисти. Изделие предназначено для многократного личного использования.

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пластиковая шина на палец Orlett FG-100 обеспечивает надежную фиксацию межфаланговых суставов пальцев кисти. Фиксация обеспечивается застежками велкро. Шина на палец рентген-негативна, обеспечивает высокий комфорт в процессе лечения за счет своего малого веса и современных материалов. В процессе эксплуатации ортез не теряет своего внешнего вида и легок в повседневном уходе. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- переломы, ушибы и прочие травмы пальцев кисти;
- вывихи суставов пальцев кисти;
- реабилитация после оперативных вмешательств на суставах пальцев кисти;
- растяжение связок пальцев кисти.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения изделия Orlett назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
- индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

КОНСТРУКЦИЯ

Ортез состоит из пластиковой шины и застежек-липучек велкро для фиксации шины.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Надеть на поврежденный палец, зафиксировать застежками-липучками велкро.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Подбор размера проводится в соответствии с длиной пальца руки, измеренной от проекции суставной щели пястно-фалангового сустава до кончика пальца.

В зависимости от строения пальцев, характера травмы (заболевания), вида лечения может потребоваться индивидуальный подбор размера, отличный от рекомендованных. Точный размер ортеза определяет врач в соответствии с указанной длиной ортеза.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Длина пальца, см	Длина ортеза, см
S	4,5-5,5	4,9
M	5,5-6,5	6,2
L	6,5-7,5	7,4
XL	7,5-9,0	8,7

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

22% полиамид, 64% полиэтилен, 14% этиленвинилацетат.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. FG-100, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



ОРТЕЗ НА ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЙ СУСТАВ

FG-100

- Ортез полной степени фиксации Orlett FG-100 предназначен для межфаланговых суставов пальцев кисти.
- Ортез изготовлен из современных материалов, очень легкий, обеспечивает высокий комфорт в процессе лечения.
- Фиксация достигается двумя прочными планками и застежками «велкро».
- Ортез рентген-негативен. Внутренний мягкий материал ортеза прилегает к коже и предохраняет от травм и пролежней.
- В процессе эксплуатации ортез не теряет своего внешнего вида, за ним легко ухаживать.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ДЛИНА ПАЛЬЦА, СМ	4,5-5,5	5,5-6,5	6,5-7,5	7,5-9,0
ДЛИНА ОРТЕЗА, СМ	4,9	6,2	7,4	8,7



Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп»
Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.



Производитель:

Рехард Технолоджис ГмБХ,
Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Претензии направлять:

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.